

Kerr™

NX3

Colle composite universelle

Colle composite universelle pour
une esthétique, une adhésion et
une polyvalence inégalées.



NX3

Colle composite universelle



Universelle.

Colle composite duale en automélange, sans amine, compatible avec tous les systèmes adhésifs du marché (mordançage total ou auto-mordançant) et sans activateur. Adhère sur tous les substrats (dentine, émail, blocs CAD/CAM, céramique, porcelaine, résine, métal, zircone, bloc CFAO, composite). Colle tout*, tout simplement !

*facette, couronne, inlay, onlay, bridge, tenon, etc...




Des restaurations esthétiques durables.

Sa pâte catalyseur sans peroxyde de dibenzoyl et son initiateur tertiaire sans amine permettent une vraie stabilité chromatique à long terme.


Sans amine, sans activateur, sans BPA.

Stabilité chromatique des composites de collage duals – teinte Clear

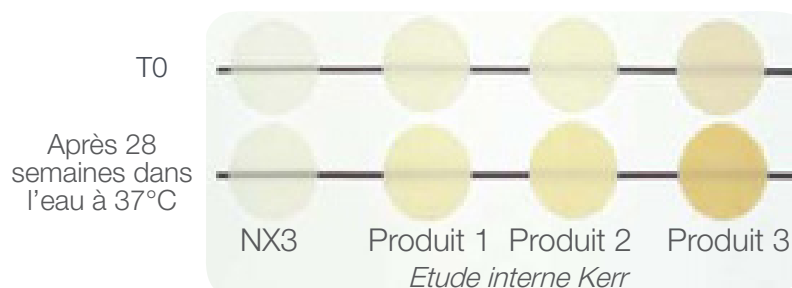

Technologie one-peel™.

La gélification des excès, après un flash de polymérisation de 2s, facilite leur élimination.

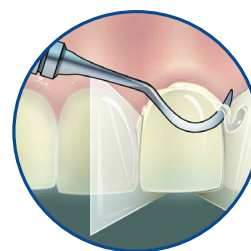


[Découvrez les articles du Dental Advisor et du CRA en scannant ces QR Codes.](#)

CRA



SCAN ME

Dental Advisor

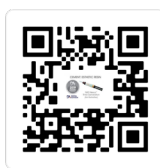

SCAN ME






Un pouvoir d'adhésion exceptionnel.

Conféré par sa grande compatibilité et sa faible solubilité dans l'eau.

RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT SUR DIVERS SUBSTRATS

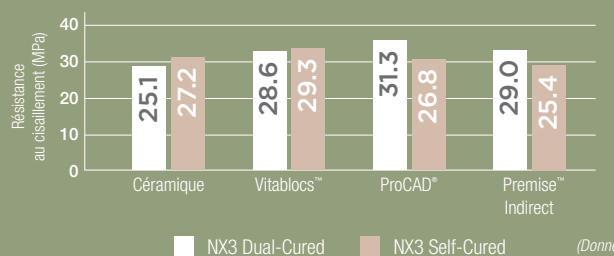


Résultats prévisibles.

Performances¹ stables à long terme

TEMPS DE PRISE AVANT ET APRÈS LE VIEILLISSEMENT¹


Après 8 semaines à 42 °C

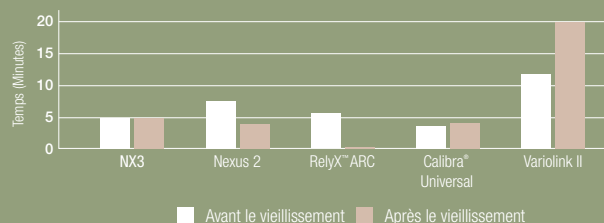

Radio-opacité élevée².

Permet une identification aisée de la restauration à la radiographie.

RADIO-OPACITÉ²

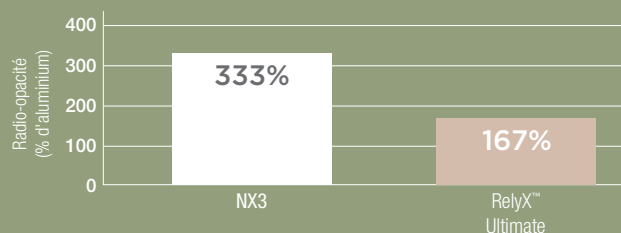

Polyvalent.

Peut également être utilisé pour sceller des piliers ou pour la réalisation de faux moignons.



NX3 - Automix

33643	NX3 transparent
33644	NX3 blanc
33645	NX3 jaune
33646	NX3 décoloré
33647	NX3 blanc opaque

CONTIENT : 1 seringue duale 5g ,
Guide Technique, Mode d'emploi.

Réassort embout NX3

33655	50 embouts d'auto-mélange
-------	---------------------------

NX3 - Photopolymérisable


33648	NX3 transparent
33649	NX3 blanc
33650	NX3 jaune
33651	NX3 décoloré
33652	NX3 blanc opaque

CONTIENT : 1 seringue 1,8g ,
Guide Technique, Mode d'emploi.



Protocole d'utilisation du NX3

Couronne Céramique / Inlay / Onlay / Facette

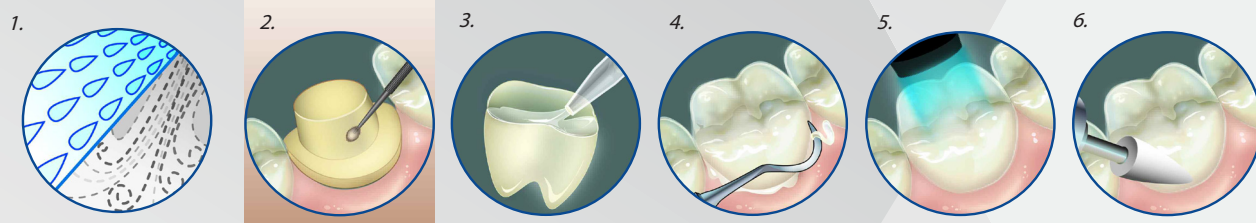

1a. Appliquer l'acide fluorhydrique dans l'intrados, laisser agir 60 secondes puis rincer abondamment.

1b. Appliquer le silane primer pendant 60s et laisser le produit s'évaporer.

2. Choisir votre système adhésif, puis l'appliquer sur la préparation.


3. Appliquer NX3 dual dans l'intrados de la pièce prothétique.

4. Positionner la pièce prothétique afin que la colle puisse fuser de part et d'autre, puis flasher 1 à 2 secondes (gélification) afin de faciliter le retrait des excès.

5. Photopolymériser les surfaces sous tous les axes durant 20s à chaque fois.

6. Faire la finition et le polissage.

Tenon

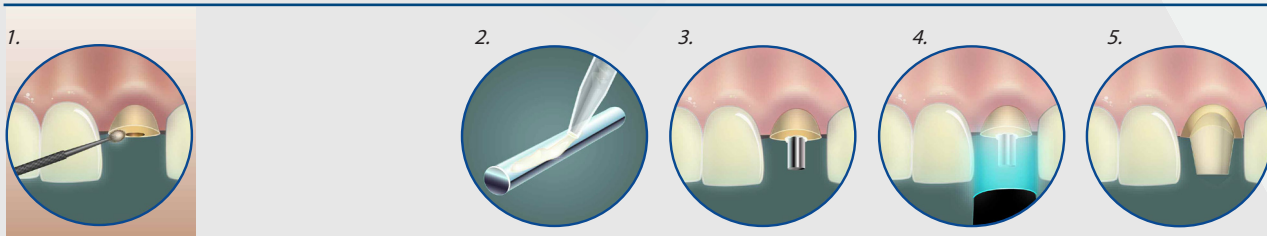

1. Préparer l'emplacement du tenon (taille ajustement).

Choisir votre système adhésif, puis l'appliquer sur l'emplacement.

Appliquer un léger jet d'air. Ne pas photopolymériser.

2. Appliquer NX3 dual directement sur le tenon.

3. Positionner le tenon dans son emplacement et le faire vibrer pour éviter de piéger des bulles d'air. Maintenir la pression, jusqu'à ce qu'il soit stable.


4. Retirer les excès.

Photopolymériser les surfaces sous tous les axes durant 20s à chaque fois.

5. Procéder à la réalisation du pillier.

Choisir votre collage : Auto-mordançant ou Mordançage total

Mordançage total ou sélectif ⁽¹⁾

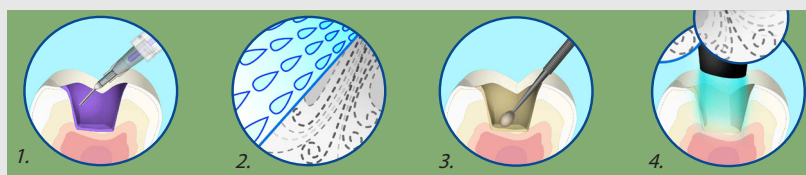


1. Mordancer l'émail et la dentine durant 15s ⁽²⁾

2. Rincer, puis appliquer un léger jet d'air

4. Appliquer l'adhésif à l'aide d'une brosse en frottant durant 15s.

5. Appliquer un léger jet d'air 3s, puis photopolymériser 10s

Auto-mordançant ⁽¹⁾

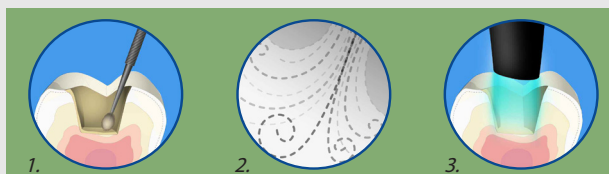

1. Appliquer l'adhésif à l'aide d'une brosse en frottant durant 20s.

2. Appliquer un léger jet d'air 5s.

3. Photopolymériser 10s.

⁽¹⁾ Se référer au protocole de l'adhésif choisi.

⁽²⁾ Avec le mordançage sélectif, mordancer uniquement l'émail.