

Tous les composants individuels sont marqués CE
Kit de dispositifs médicaux à usage professionnel uniquement
Système de matrice antérieure

Mode d'emploi

Description

Grâce à leur forme bombée, Unica anterior et Unica minideep anterior s'adaptent correctement aux différentes morphologies des dents avant ; elles sont conçues pour restaurer les marges interproximales et cervicales en une seule fois, même en présence d'une digue en caoutchouc ou de cordes de rétraction gingivale, ce qui réduit amplement le temps passé sur le fauteuil. De plus, lorsqu'elles sont posées, les matrices Unica anterior et Unica minideep anterior permettent de visualiser aisément la forme finale de la restauration. Unica anterior et Unica minideep anterior permettent de : Restaurer les marges proximale et cervicale en une seule fois, Restaurer de manière anatomique les marges proximales grâce à leur contour bombé, Gérer aisément la zone cervicale. Les matrices Unica Proximal et Unica Proximal Deep sont particulièrement indiquées pour les restaurations antérieures qui impliquent les parois proximales (Classe III, IV, incisives latérales riziformes, fermetures de diastèmes, facettes partielles et totales). Facile à mettre en place, l'arc cervical labio-palatin vise à fixer la matrice entre la papille et la dent au niveau sous-gingival, augmentant ainsi la stabilité de la matrice une fois mise en place. L'utilisation d'un coin pour fixer la matrice est autorisée mais pas obligatoire. La forme conçue pour s'adapter aux dents antérieures améliore la visibilité et l'accès au champ opératoire par rapport à d'autres solutions comme les matrices sectionnelles postérieures.

Composition

Unica anterior et Unica minideep anterior : acier inoxydable | Unica Proximal et Unica Proximal Deep : acier inoxydable | myWedge : thermoplastique.

Indications

Unica master kit est indiqué pour les : restaurations de cavités de classe III, restaurations de cavités de classe IV, restaurations de cavités de classe V, facettes en composite de stratification directe, modifications de forme.

Contre-indications

Néant.

Effets secondaires

On ne compte aucun effet secondaire connu. Prière de signaler rapidement tout incident sérieux en contactant le distributeur ou Polydentia.

Interactions avec d'autres dispositifs ou produits médicaux

Aucune interaction n'est connue.

Informations pour le patient

Aucune information à propos de Unica master kit n'est nécessaire pour le patient.

Conservation et stockage

Conserver dans un environnement propre et sec à l'abri de l'humidité ou d'une humidité excessive.


Avertissements

En raison de la présence de petits éléments pointus, l'usage d'une digue dentaire en caoutchouc est obligatoire afin de prévenir toute ingestion ou aspiration accidentelle.


Application

Choisissez une matrice antérieure appropriée: Choisissez ① Unica Proximal ou ② Unica Proximal Deep pour les restaurations antérieures impliquant les parois proximales. Utilisez ② Unica Proximal Deep conçu tout spécialement pour applications Péro avec une papille plate. Dans les cas difficiles exigeant la restauration des zones cervicales et proximales (facette complète), utiliser Unica anterior ou Unica Minideep anterior. ③ Sélectionnez Unica anterior pour : les incisives centrales maxillaires les incisives latérales maxillaires les canines. ④ Sélectionnez Unica minideep anterior pour : les latéraux maxillaires et mandibulaires les incisives centrales mandibulaires les dents conoïdes les dents triangulaires les latérales riziformes les dents à diamètre cervical étroit.


Unica Proximal anterior matrices

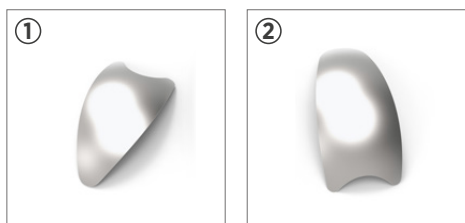


Unica anterior matrices

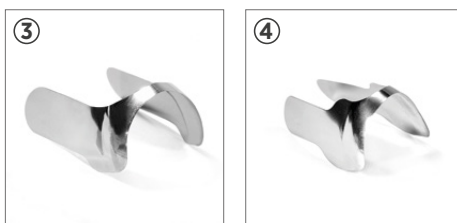

Comment positionner Unica Proximal et Unica Proximal Deep: ⑤ Sélectionner la matrice et la faire glisser doucement en position interproximale. ⑥ Fixer la matrice entre la papille et la dent au niveau sous-gingival. ⑦ Un coin interproximal (ex. myWedge) peut être utilisé pour fixer la matrice mais ce n'est pas obligatoire.

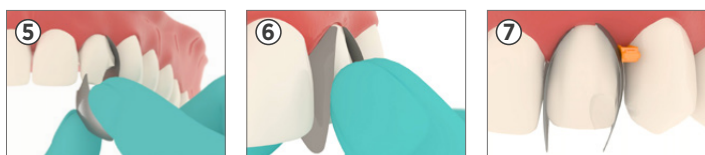

Comment positionner Unica anterior et Unica minideep anterior: ⑧ Utilisez les ailettes de positionnement pour placer Unica de manière proximale. En cas de surfaces de contact étroites, insérez une ailette à la fois. ⑨ Tirez doucement la matrice vers le palais avec les ailettes de positionnement. ⑩ Poussez la connexion cervicale dans le sulcus gingival. ⑪ Insérez les coins interdentaires myWedge pour fixer la matrice en place.

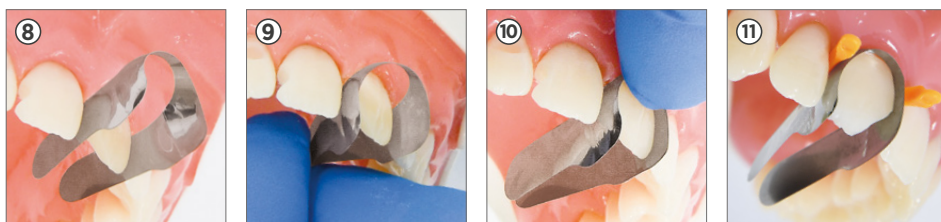

Élimination

Du fait de leur composition, les matrices et coins interdentaires ne sauraient être stérilisés et sont donc à usage unique. Ne pas les réutiliser. Éliminer de manière appropriée les dispositifs contaminés par des substances potentiellement infectieuses d'origine humaine, conformément aux dispositions locales.

Conseils et astuces

Fixez Unica anterior et Unica minideep anterior avec une digue liquide lorsque le coin risque de déplacer ou de déformer la matrice.

✔ Oui. ✘ Non.

